

標準注意検査法 持続性注意検査2 (CAT-CPT2) インストール手順

1

CD-ROMをパソコンにセット

Windows 7 (32bit, 64bit)、
Windows 8 (64bit)、
Windows 8.1 (64bit)、
Windows 10 (64bit)

2

しばらくすると画面に「installer」が表示される
「installer」をクリックすると次の画面が表示される

名前	種類	圧縮サイズ	パスワ
AUTORUN	セットアップ情報	1 KB	有
setup	アプリケーション	229 KB	有
Setup_CPT2	Windows インストーラ...	294 KB	有

3

Setupを開く
(またはsetup.exeを開く)

注)※1 AUTORUNは自動再生のことで、インストール時にクリックする必要はありません。

※2 Setup_CPT2 (または Setup_CPT2.msi) は CPT2と、CPT2が動作するのに必要な環境をインストールします。ただし、「Microsoft Windows Installer」というソフトがパソコンに入っていないと使えません。基本的にはsetup (または setup.exe) を開いてCPT2をインストールすることを推奨いたします。

名前	種類	圧縮サイズ	パスワ
AUTORUN	セットアップ情報	1 KB	有
setup	アプリケーション	229 KB	有
Setup_CPT2	Windows インストーラ...	294 KB	有


4

次にこの画面が表示される



5

詳細情報をクリック

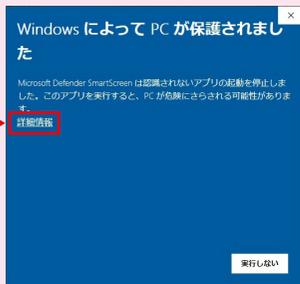

6

「CPT2セットアップウィザードへようこそ」が開く




7

「次へ」をクリック



8


「次へ」をクリック

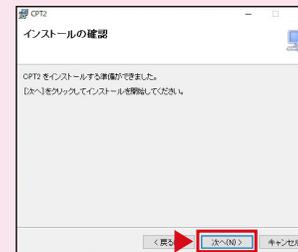

9

「はい」をクリック

注)「発行元：不明」と表示されますが、発行元は株式会社新興医学出版社、著作権者は一般社団法人日本高次脳機能障害学会です。ご安心ください。

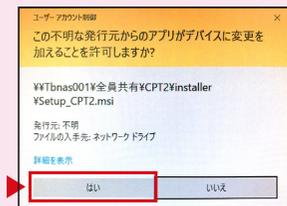

10

「閉じる」をクリック



11

デスクトップにCPT2のアイコンが現れる

アイコンをクリックするとCPT2が起動します



標準注意検査法 持続性注意検査2
(CAT-CPT2)

株式会社 新興医学出版社